

取扱説明書



添付文書

ゲルシート MXTS は「低周波治療器 MXTS」、「低周波治療器 MXTS-MR100」と組み合わせて使用するための導子です。ご使用前に本品と「低周波治療器 MXTS」、「低周波治療器 MXTS-MR100」の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



安全上の注意




必ずお守りください




- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

| | |
|--|--|
|  警告 | 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。 |
|  注意 | 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。 |

<絵表示の例>

| | |
|--|--|
|  「禁止」(してはいけないこと)を示します。 |  「強制」(必ず守ること)を示します。 |
|--|--|

|  警告 | |
|--|---|
|  必ず守る | ゲルシートをはずすときは必ず電源を切る。強いショックを受けるおそれがあります。 |
|  禁止 | 治療以外の目的で使用しない。お子様や自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人に使用させない。事故やけがのおそれがあります。 |


|  注意 | |
|--|---|
|  必ず守る | 使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談する。事故や体調不良のおそれがあります。 |
|  禁止 | ゲルシートを患部に貼りつけたまま放置しない。皮膚の炎症などをおこすおそれがあります。 お子様の手が届くところに置いたり保管したりしない。事故のおそれがあります。 |

パッケージ内容の確認

●スタンダード（2枚入り）

型番:MXTS-200GELW2P (ホワイト)
 MXTS-200GELP2P (ピンク)
 MXTS-200GELB2P (ブラック)


保管台紙

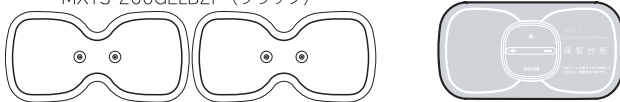

●スポット（2枚入り）

型番:MXTS-200GELFW2P


保管台紙

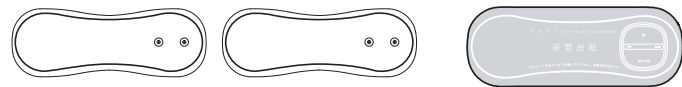

●ワイド（1枚入り）


型番:MXTS-200GELWW1P

保管台紙

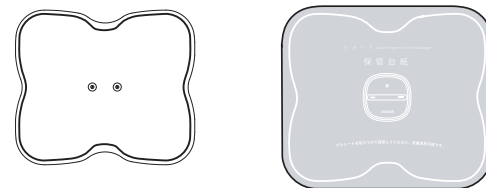

各部の名称


●ゲルシート スタンダードの場合

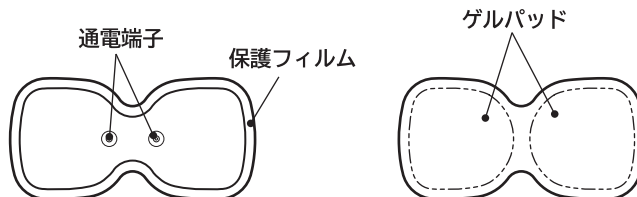

使用前の準備

- 1 ゲルシートを袋から取り出す。
- 2 保護フィルムをはがして、保管台紙に貼りつける。
- 3 本体の出力端子とゲルシートの通電端子を接続する。

※スポット、ワイドについても同様の方法で使用前の準備を行ってください。

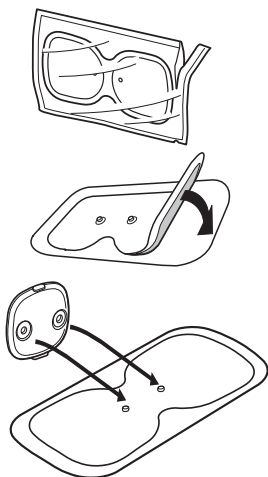

お手入れ

- ゲルパッドの表面に汚れが付き粘着力が弱くなった場合は、ゲルシートから本体をはずし、保管台紙をはがしてお手入れしてください。
(ご使用10回程度を目安)
- 指の腹に水をつけ、ゲルパッドの表面を軽くなでるようにして汚れをとります。
- 表面の水気が無くなるまで自然乾燥させてください。
- ゲルシートは消耗品です。粘着力が弱くなったら、ゲルシートと交換してください。

注意

- ゲルパッド面同士を貼りつけない。
- つめやブラシでこすらない。
- 水中につけない。
- 自然乾燥時は、直射日光を避ける。
- ゲルパッドをティッシュや乾いた布でふかない。
- ゲルシートを曲げたり、傷つけたりしない。

仕様

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 類別 | 機械器具 78 家庭用電気治療器 | |
| 一般的名称 | 家庭用低周波治療器向け導子 (JMDNコード: 71008000) | |
| 医療機器分類 | 一般医療機器 | |
| 販売名 | ゲルシート MXTS | |
| 医療機器届出番号 | 40B2X10008000002 | |
| 寸法 | スタンダード | 縦61×横125×厚さ0.5mm |
| | スポット | 縦59×横190×厚さ0.5mm |
| | ワイド | 縦154×横180×厚さ0.5mm |
| 質量 | スタンダード | 約12g (1枚) |
| | スポット | 約12g (1枚) |
| | ワイド | 約41g (1枚) |
| 製造元 | ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION | |
| 製造販売元 | マクセル株式会社 福岡県田川郡福智町伊方4680 電話: 0947-22-0585 | |

ご購入に関するお問い合わせは、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区元代々木町30-13

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<http://www.maxell.co.jp>

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)